

PFLEGEEMPFEHLUNG

- ➔ VERBANDSWECHSEL UND KATHETERAUSTRITTSSTELLEN [KAST] – PFLEGE
- ➔ DUSCHANLEITUNG

ZIEL: INFEKTIONEN UND DEFEKTE VERMEIDEN



Verbandswechsel

Verbandswechsel

In dieser Anleitung werden die Schritte eines korrekten Verbandwechsels gezeigt. Es soll das Patiententraining durch ausgebildetes PD-Fachpersonal allerdings nicht ersetzen. Im Zweifelsfall ist den Anordnungen des behandelnden Arztes/Pflegefachkrafts Folge zu leisten.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an ihr betreuendes Dialysezentrum.

Ein ausführliches Trainingsvideo zum Verbandwechsel finden Sie auf unserer Webseite: www.dialyse-zuhause.de



Video Verbandwechsel

Öffnen Sie die Kamera Ihres Telefons. Halten Sie das Gerät so, dass der QR-Code im Sucher in der Kamera-App angezeigt wird. Das Gerät erkennt den QR-Code und zeigt eine Mitteilung. Klicken Sie auf die Mitteilung und die Webseite „Dialyse zuhause“ mit dem Video zum Verbandwechsel öffnet sich.

1. Benötigtes Material



- Händewaschlotion (nicht fettend, pH-hautneutral, parfümfrei)
- Händedesinfektionsmittel
- Flächendesinfektionsmittel
- Hautreinigungs- bzw. Desinfektionsmittel zentrumsspezifisch
- Mund-Nasenschutz
- Pflaster mit Wundauflage oder Wundverband
- 3 Päckchen sterile Kompressen (6 Stück)
- Katheterfixation (z. B. mit einem Rollenpflaster)

2. Vorbereitung



1. Schmuck und Armbanduhr ablegen
2. Fenster und Türen schließen
3. Mund-Nasenschutz anziehen
4. Arbeitsfläche desinfizieren und vorbereiten
5. Kompressenpäckchen und Wundverband öffnen
6. 4 sterile Kompressen mit der Lösung zur Reinigung oder Desinfektion tränken

3. Durchführung



1. Verband entfernen, kontrollieren und verwerfen
2. Hände desinfektion
3. Hautareal und die Katheteraustrittsstelle (KAST) auf Auffälligkeiten überprüfen (z. B. Rötung, Schwellung, Schmerz, Kruste, Austritt von Flüssigkeit). Bei Auffälligkeiten informieren Sie bitte umgehend ihr Dialysezentrum.
4. Händedesinfektion
5. Mit den 4 getränkten Kompressen die Reinigung bzw. Desinfektion der KAST durchführen. Jeweils mit einer Kompresse an der KAST von innen nach aussen in eine Himmelsrichtung wischen.
6. KAST trocknen lassen (damit wird die Einwirkzeit gewährleistet)
7. Individuell, nach Katheteraustritt, Katheter mit einer sterilen Kompresse unterlegen und mit dem Wundverband fixieren.
8. Mini-Set Überleitungssystem mit Pflasterstreifen am Bauch festkleben. Druck und Zug auf den Katheter sollte vermieden werden.

Duschanleitung

Duschanleitung

Die Erlaubnis zum Duschen erteilt Ihnen ihr Dialysearzt (in der Regel nach 4 bis 6 Wochen nach der Katheter-Implantation).

1. Verband entfernen
2. Wasser eine Minute laufen lassen.
3. Üblicher Duschvorgang
4. Katheteraustritt einseifen und mit klarem Wasser abspülen.
5. Körper abtrocknen, Katheteraustrittsstelle aussparen
6. Katheteraustrittsstelle mit sterilen Kompressen oder extra Handtuch trocknen und danach wie üblich verbinden.



Hinweis

- Reinigung mit Kombinationsprodukten „Duschen und Cremen in einem“ sollte vermieden werden (Schädigung des Kathetermaterials möglich).
- Duschstrahl keinesfalls direkt auf die Katheteraustrittsstelle richten.
- Auf Zugentlastung des Katheters beim Duschen achten.
- KASt nicht trocken föhnen!

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel +49 89 317 010
info_de@baxter.com
www.baxter.de

Österreich

Baxter Healthcare GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien
Tel +43 1 71120 0
rena_austria@baxter.com
www.baxter.at

Schweiz

Baxter AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)
Tel +41 44 908 50 50
info_ch@baxter.com
www.baxter.ch