

Homechoice Claria

A Vorbereitung der Behandlung

- 1 Arbeitsplatz vorbereiten
 - Gerät reinigen
 - Material bereitlegen und Umverpackung von Beutel und Set öffnen
 - Hände waschen
 - Händedesinfektion
- 2 Beutel auspacken, kontrollieren, mischen und bereitlegen



- 4 Anzeige: **NETZWERKVERBINDUNG WIRD HERGESTELLT**
- 5 Wenn das System feststellt, dass neue Behandlungsparameter auf der Share-Source-Plattform vorhanden sind, wird die Meldung **EINSTELLUNGEN BESTÄTIGEN** angezeigt



- 12 Mundschutz & Händedesinfektion
- 13 Alle Beutel anschließen:
 - LEITUNG RÖTE KLEMME**
Heizbeutel
 - LEITUNGEN WEISSE KLEMMEN**
Vorratsbeutel
 - LEITUNG BLAUE KLEMME**
letzter Beutel



B Start der Behandlung



Der Homechoice Claria startet die Therapie

C Ende der Behandlung

